


Arco Ostby

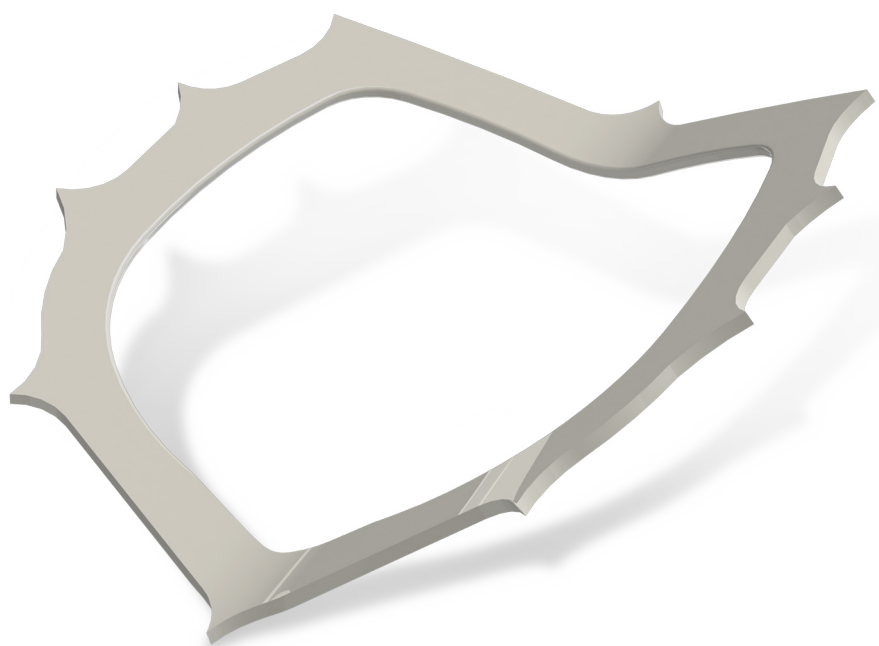

- Fijación de la hoja de goma y aislamiento absoluto

ARCO OSTBY: Produto articulado, em material esterilizável, dotado de garras para fixação do dique de goma para isolamento total dos dentes durante procedimentos clínicos.

INDICAÇÃO: Arco de fixação do dique de goma para isolamento absoluto em odontologia.

INSTRUÇÕES DE USO: Sujete o dique de goma em o ARCO OSTBY; leve todo o conjunto à boca do paciente, marque o dente que levará a intervenção; perfure o dique de goma em o local marcado e sujete ao dente com a ajuda de grapas.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em lavadoras ultrassônicas com sabão enzimático (mínimo de três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Depois de lavar em água corrente e observar presença de resíduos, repita o processo, se persiste, se deve retirar os resíduos através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Uso de solução de ácido peracético a 0,2% para dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Poliacetal.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código

Descripción

Presentación

ANVISA

102565100803

Arco Ostby

1 unidad

180213420013



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira